

CleseMed

Gebrauchsfertige Schnelldesinfektion

viruzid

PRÄPARATETYP

Kleiser CleseMed ist ein gebrauchsfertiges, patentiertes und nach neuesten Technologien entwickeltes Präparat zur Reinigung, Schnell- und Wischdesinfektion von Medizinprodukten und medizinischem Inventar, wirkend im Sinne des Medizinproduktgesetzes.

Kleiser CleseMed ist sehr gut hautverträglich. (Gutachten Bioserv)

Kleiser CleseMed bietet u.a. auch angenehme frische Düfte und erfüllt die gesetzlichen Anforderungen zur Arbeitssicherheit gem. TRGS 525/540.

ANWENDUNGSGEBIETE

Kleiser CleseMed als Flächendesinfektionsmittel ist in Bereichen, in denen Schnelldesinfektion gebraucht wird geeignet für:

- Arzt- und Zahnarztpraxen
- Schnelldesinfektion von OP-Inventar und -Tischen zwischen Operationen
- Bettgestelle, Matratzen, Decken und Kissen Bekleidung wie Kittel, OP-Schuhe, Gummischürzen

Achtung: Bei alkoholempfindlichen Oberflächen CleseMed nur vorsichtig verwenden.
Nach dem öffnen, bei geschlossenem Kanister 3 Monate haltbar.


ANWENDUNG:

Kleiser CleseMed kann als Wischdesinfektion oder Sprühdesinfektion verwendet werden. Bei der Wischdesinfektion sollte (laut Empfehlung RKI) eine ausreichende Menge Kleiser CleseMed auf ein Einmaltuch gegeben werden. Während der erforderlichen Einwirkzeit muss die Oberfläche vollständig benetzt sein (Nass-Wischen).

Das Sprühdesinfektionsverfahren wird nur für schwerzugängliche Oberflächen empfohlen. Beim Sprühdesinfektions-Verfahren unverdünnt auf Gegenstände und Flächen ausbringen und einwirken lassen. Auf vollständige Benetzung achten ggf. überschüssige Präparatemenen nach Einwirkzeit mit ungefärbtem Einmaltuch entfernen.

LAGERHINWEISE

- Kühl lagern, Erhitzen führt zu Druckerhöhungen und Berstgefahr.
- Vor Hitze und direkter Sonneneinstrahlung schützen.
- Vor Feuer schützen.

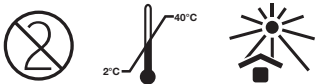

- Viruzid
- Nachgewiesene Viruzidie
Flächentest Phase 2/Stufe 2
- Sehr gut hautverträglich.
Dermatologisch getestet.
- VAH gelistet

LIEFEREINHEITEN UND DOSIERHILFEN

10 Liter Kanister

- Art: 201001: ohne Parfüm
- Art: 201002: Lemon
- Art: 201005: gr. Apfel
- Art: 201006: Flower
- Art: 201008: Fruit

- Dosierpumpe für Kanister
- 1 Liter Dosierflasche
- Auslaufhahn

CleseMed

Gebrauchsfertige Schnelldesinfektion

viruzid

EINWIRKZEITEN GUTACHTEN der Tücher:

BAKTERIZID:

MRSA, *S. aureus*, *E. hirae*, *P. aeruginosa*, *C. albicans*, *E. coli*, *P. mirabilis* DIN EN 16615 (*2019) 1 min
Levurozid DIN EN 16615 (*2019) *Acinetobacter baumannii* 1 min

TBC:

Mycobacterium terrae, *Mycobacterium avium* EN 16615 (*2019) hohe Belastung Phase 2/ Stufe 2 1 min

Fungizid:

A. brasiliensis EN 16615 (*2019) hohe Belastung Phase 2/ Stufe 2 1 min

Viruzid

behüllte Viren

BVDV (HBV/HIV/HCV) (Influenzavirus, HINI/ H5NI, Herpes-, Corona-, SARS- CoV) 1 min
Vaccinia Stamm Elstree

unbehüllte Viren mit hoher Belastung

praxisnaher Flächentest: Phase 2/ Stufe 2 als Wischendesinfektion EN 16777:2018

Adenovirus Typ 5 5 min
Poliovirus Typ 1 5 min
Rotavirus 5 min
Murine Norovirus 5 min
Polyoma Virus SV40 5 min

*alle Gutachten wurden im Jahr 2019 und 2020 durchgeführt

PRODUKTZUSAMMENSETZUNG

In 100 g gebrauchsfertiger Tränklösung sind enthalten:
59 g Ethanol, 0,25 g H₂O₂



Kleiser Medical GmbH
Conradin-Kreutzer-Str. 35, 88605 Meßkirch
Tel.: 0 75 75 / 9 25 04-0, Freifax: 08 00 / 2 35 23 29
www.kleiser-medical.de / service@kleiser-medical.de

CHEMISCH-PHYSIKALISCHE DATEN

Aussehen: klar, farblos
pH-Wert: ca. 5,8
Dichte bei 20°: 0,9 - 0,92

EINSTUFUNG GEMÄSS VERORDNUNG (EG)

NR. 1272/2008

siehe Produktkennzeichnung und Sicherheitsdatenblatt

KENNZEICHNUNG

CE 0044

Medizinprodukt Klasse II a
UN-Nummer 1987

UMWELTINFORMATION

Kleiser Medical stellt seine Produkte nach fortschrittlichen, sicheren und umweltschonenden Verfahren wirtschaftlich und unter Einhaltung hoher Qualitätsstandards (EN ISO 9001, EN ISO 13485) her. In den durch Gutachten nachgewiesene biologische Abbaubarkeit wird gezeigt, dass Abwasser und Umwelt bei der Entsorgung wesentlich weniger stark belastet und somit geschont werden.

PERSÖNLICHER SCHUTZ

Schutzausrüstung tragen (Handschuhe, Augenschutz, Mundschutz, Schutzkleidung). Ungeschützte Personen fern halten. Für ausreichend Lüftung sorgen. Berührung mit den Augen vermeiden. Dampf/Aerosol nicht einatmen. Zündquellen fernhalten.

BESONDERER HINWEIS

Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen. Desinfektionsmittel und Biozide sicher verwenden! Gemäß der EU Verordnung MDR 745/2017 müssen Sie erkannte „schwerwiegende Fälle“ Kleiser Medical und Ihrem Reg.-Präs. melden. Um die Sicherheit und Leistung des Produkts zu gewährleisten, sollten sich Anwender vor der Verwendung des Produkts über Funktionsweise, potenzielle Risiken, sowie Maßnahmen zur Risikovermeidung informieren.